

Sådan bruger og vedligeholder du
dit personlige hjælpemiddel fra Ortos

TLSO Semirigid

Thoraco Lumbo Sacral Ortose



- Stofstøttekorset højt/lavt
- Stofstøttekorset med BH
- Abdominalt korset
- Elastisk korset
- Keystonkorset
- Præfabrikeret produkt



Ortos
Individuel forståelse

Hvad er et korset?

Et korset er et personligt hjælpemiddel, som kun passer til dig, og det kan ikke bruges af andre. Et korset sidder uden på kroppen for at støtte og afhjælpe et problem, som kan være af fysisk eller smertemæssig karakter. Et korset er fremstillet af stof og/eller elastisk materiale. De fleste korsetter har metalstivere og metalfjedre for at forstærke funktionen samt holde på formen under anvendelse.

Sådan tager du korsettet på

Bandagisten vil tilpasse korsettet og vise dig, hvordan du skal tage det på. Korsettet skal sidde godt til for at give den ønskede effekt. Dette forhindrer også, at korsettet glider op eller roterer på kroppen.

Det er vigtigt, at du altid sikrer dig, at taljemarkeringen i korsettet passer med din talje.

Et korset skal i nogle tilfælde bruges efter behov. Det er vigtigt, at du kender dit behov for brug af korsettet, så det bruges korrekt.

Vær opmærksom på trykmærker

Korsetter giver som regel ikke trykproblemer, men du vil altid kunne se mærker, hvor korsettet har støttet, når du tager det af.

Du skal også være opmærksom på tryk, hvis du bruger korsettet uden på eksempelvis bukser, hvor der er en tyk linning.

Hvis du har sukkersyge eller nedsat følelse, skal du være ekstra forsigtig med tryk. Du skal kigge efter røde mærker hver dag. Det kan bl.a. være hvor metalstiverne ender. Røde mærker skal forsvinde 20-30 min efter, du har taget korsettet af. Kontakt bandagisten ved tegn på tryk, så korsettet kan rettes til.

Sved og fugt

Korsettet er lavet i materialer, som vil suge fugt og sved. Huden kan reagere på sved. Derfor er det vigtigt, at du jævnligt rengører dit korset.

Det vil altid være en god idé at have en undertrøje eller en T-shirt, der sidder tæt på kroppen under korsettet. Undertrøjen vil tage den første del af fugten, og du kan anvende korsettet i flere dage uden at vaske det.



Vask

De fleste korsetter kan vaskes i hånden.

Brug håndvarmt vand og mild sæbe og skyl altid godt efter, så der ikke er sæberester i korsettet. Din hud kan reagere på sæberester.

Korsettet skal lufttørres. Det må ikke tørretumbles, lægges på et varmelegeme eller i direkte sollys. Læg eller hæng korsettet op, så stoffet ikke vrider.

Hvis der er indvendige puder i korsettet, som kan tages ud, skal dette gøres, inden korsettet vaskes.

Sådan vedligeholder du dit korset

Når du ikke har korsettet på, skal det lægges fladt med retsiden ud. Det sikrer, at korsettet ikke vrides skævt.

Pasform og slitage

Stof og elastik er bløde materialer og vil blive slidt ved brug. Det kan være svært at sætte tid på, hvor længe et korset holder. Det afhænger af brugen af korsettet. Et nedslidt korset vil ikke have den optimale funktion. Stoffet vil virke slapt og løst og kan være flosset langs kanterne og i syningerne.

3 måneders tilpasningsservice

Der er en tilpasningsservice på 3 måneder på alle produkter. Denne service er gældende 3 måneder efter udlevering af produktet under forudsætning af, at der ikke sker væsentlige fysiske ændringer i den periode. F.eks. store ændringer i vægten eller lignende. Ved ændringer eller justeringer efter 3 måneder, skal du søge kommunen om en bevilling.

Forny et korset

Der kræves en ny bevilling fra din kommune, hver gang der skal laves et nyt korset. Hvis der er væsentlige ændringer i korsettets opbygning og funktion, kan det være nødvendigt at få en ny ordination hos speciallægen.

Erklæring vedrørende udstyr til særlige formål

Det bekræftes hermed, at det pågældende udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav i forordning 2017/745 om medicinsk udstyr, MDR (Medical Device Regulation 2017/745).

Dato:

Initialer:

Underskrift:

Senest revideret d. 24. 01. 2022

Din bandagists specifikke instruktion



Ortos
Individuel forståelse

AALBORG
Indkildevej 4 B
DK-9210 Aalborg SØ
Tel: 82 30 55 05

KOLDING
C.F. Tietgens Vej 10
DK-6000 Kolding
Tel: 75 57 40 60

BRØNDBY
Sognevej 25, Byg. 87
DK-2605 Brøndby
Tel: 43 53 05 05

ODENSE
Børstenbindervej 12
DK-5230 Odense M
Tel: 63 15 05 05

AARHUS
Graham Bells Vej 8
DK-8200 Århus N
Tel: 86 22 05 05

KØGE
Tigervej 37
DK-4600 Køge
Tel: 82 30 55 06

ESBJERG
Tømrrervej 18-20
DK-6710 Esbjerg V
Tel: 76 56 40 60

VEJLE
Vindinggård Ringvej 1
DK-7100 Vejle
Tel: 86 22 05 05